

Merkblatt zum Bemer Horse-Set

Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für den Test des Bemer Horse Sets entschieden.

Die in der Einweisung besprochenen Punkte erhalten Sie hier noch einmal kurz zusammengefasst – bei Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.

- ✓ Lesen Sie vor der ersten „alleinigen“ Benutzung das Benutzerhandbuch
- ✓ Sie können die Bemer Decke ohne die Gamaschen anwenden aber die **Gamaschen immer nur in Verbindung mit der Decke**
- ✓ Wenn Sie die Bemer Decke nach der Arbeit anwenden, verwenden Sie die Stufe P1
- ✓ Wenn Sie die Programmstufe wechseln und feststellen, dass Ihr Pferd stark reagiert, gehen Sie auf die vorhergehende Stufe zurück
- ✓ Bei offenen Wunden und akutem Fieber wenden Sie das Bemer Horse Set nicht an

Auszug aus dem Benutzerhandbuch:

P1 ist das Programm mit der geringsten Intensität; die Anwendungsdauer beträgt 5 Minuten.

P2 beginnt mit der gleichen Intensität wie P1 und steigt dann auf mittlere Intensität an; die Anwendungsdauer beträgt 10 Minuten.

P3 kombiniert die Funktionen von P1 und P2 und erreicht eine maximale Intensität von 35 μ T bei Anwendung mit der Pferdedecke bzw. 100 μ T bei Anwendung mit den Gamaschen; die Anwendungsdauer beträgt 15 Minuten.

Wir empfehlen die Anwendung der Produkte des BEMER Horse-Sets grundsätzlich täglich vor und/ oder nach dem Reiten. Jedes Pferd reagiert individuell auf Stimulationen. Daher sollten Sie bei der Auswahl der Programme und der Häufigkeit der Anwendung die individuelle Situation Ihres Pferdes hinsichtlich Gesundheitszustand, Belastung und Leistungsanforderungen berücksichtigen. Für die gezielte Behandlung im Beinbereich können die Gamaschen verwendet werden. Im Laufe der Anwendung werden Sie schnell selbst feststellen, welches Programm für Ihr Pferd am angenehmsten ist und Ihren Anforderungen am ehesten entspricht. Das BEMER Horse-Set ist einfach anzuwenden und kann dank seiner verstellbaren Halterung

Hiermit bestätige ich, dass mir das Bemer Horse Set in einwandfreiem Zustand voll funktionsfähig übergeben wurde.

